

IGS -GRIPSOCKANS Bruksanvisning

Ny finsk uppfinning för förhindrandet av halkning. Lätt att använda, luftig och flexibel. Användbar inomhus på alla golvytor, också i våta utrymmen. Produkten är tillverkad av miljövänligt material, som kan återvinnas. Gripsockan skapar ytterst mycket friktion. Rulla upp gripsockan på foten - INTE genom att dra i skaftet.

VAL AV SOCKA

Välj sockan enligt storleken på användarens fot. Om foten är uppsvullen, det finns suturer eller sår, välj då en storlek större socka. Sockan kan förstoras där det behöva också genom att klippa nätstrukturens hål större; strukturen sprätts inte upp. Hos patienter, som släpar ena foten, kan friktionen som gripsockan erbjuder, försvåra rörelseförmågan.

ATT TA PÅ SIG GRIPSOCKAN

- 1 Börja med att sätta den rullade sockans spets på tårna.
- 2 Fortsätt att ta på sockan genom att rulla upp den mot helen.
- 3 Rulla sockdelen upp mot vristen samtidigt som man töjer ut sockan över helen.
- 4 Jämna ut sockan "masserande" med händerna mot foten, kontrollerande samtidigt att sockan inte spänner vid tårna.

OBS! Undvik nätstrukturens utvidgning vid helen och ovanpå varandra varande spända lager på foten och vristen.

SLITSNING

- 5 Om användarens fot är uppsvullen, det finns sår / suturer kan sockan utvidgas genom att slitsa den. Höj nätet och klipp på det stället som skall utvidgas.
- 6 I duchen lyckas tåtvätten lätt, när man klipper upp ett ca 5 cm hål längs med tårna.
- 7 Vänd sockans spets ner under tårna och efter tvätten tillbaka på plats.

OBS!

Lämna alltid kvar ca 2 cm helt skaft för att få sockan att på foten.

AVLÄGSNING


- 8 Avlägsna sockorna genom att rulla från skaftet ned mot spätsen. Således är sockorna klara för nästa användning.

Teknisk information


CareCare IGS - Instant Grip Sock

Gripsocka som hindrar halkning

Storlek: S, M, L

Material: SEBS 

Återvinning: Energiavfall

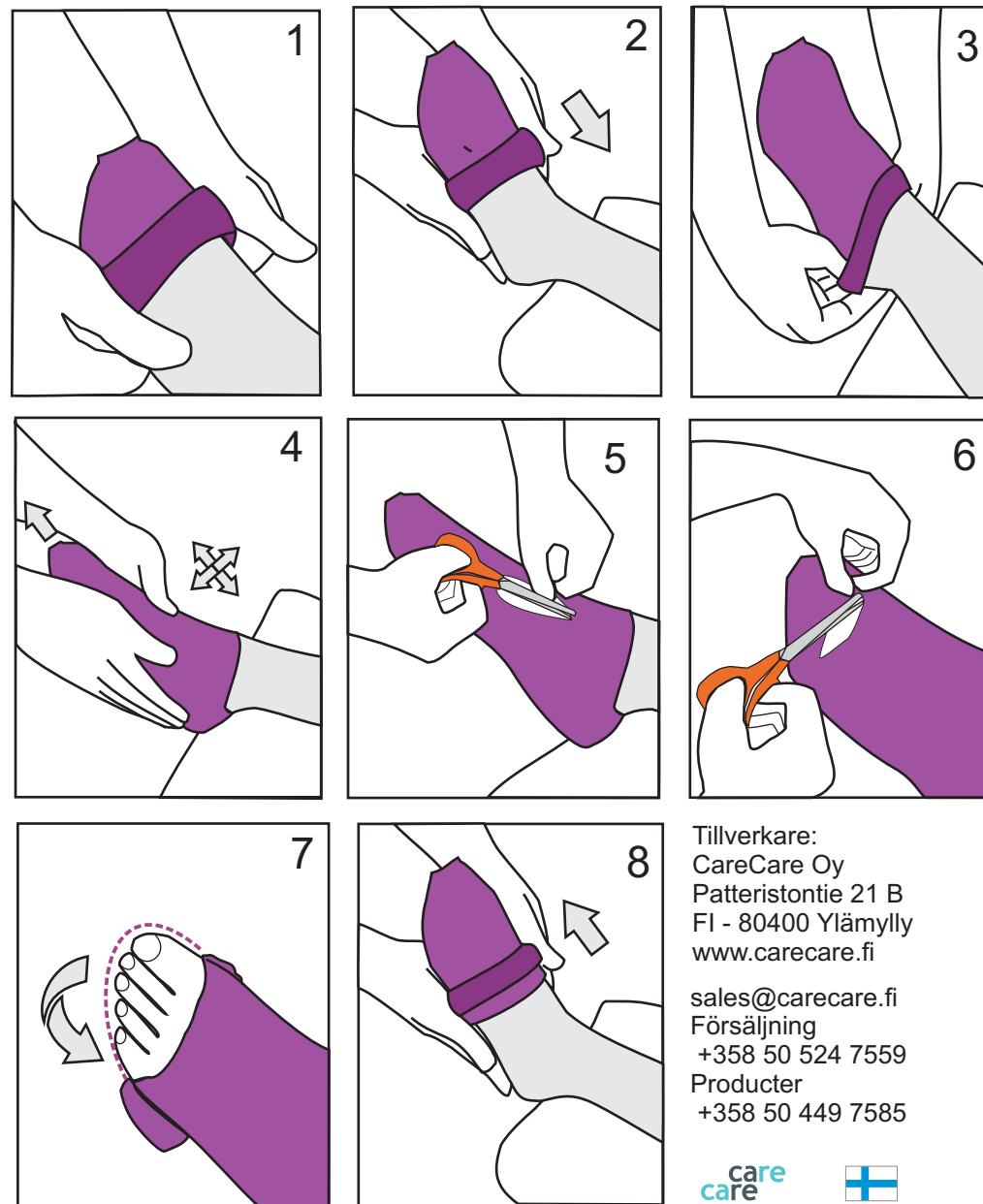

Tillverkare:
CareCare Oy
Patteristontie 21 B
FI - 80400 Ylämylly
www.carecare.fi

sales@carecare.fi
Försäljning
+358 50 524 7559
Producter
+358 50 449 7585

care
care



Bruksanvisningsvideon: [www.carecare.fi/tuotteet/CareCare IGS](http://www.carecare.fi/tuotteet/CareCare%20IGS)

FI 11688 / U2170663 Pat.Pend FI 2170663