

IGS -Gripsockans Bruksanvisning

Ny finsk uppfinning för förhindrandet av halkning. Lätt att använda, luftig och flexibel. Användbar inomhus på alla golvytor, också i våta utrymmen. Produkten är tillverkad av miljövänligt material, som kan återvinnas. Gripsockan skapar ytterst mycket friktion. **Rulla upp gripsockan på foten - INTE genom att dra i skaftet.**

VAL AV SOCKA

Välj sockan enligt storleken på användarens fot. Om foten är uppsvullen, det finns suturer eller sår, välj då en storlek större socka. Sockan kan förstöras där det behöva också genom att klippa nätstrukturens hål större; strukturen sprätts inte upp. Hos patienter, som släpar ena foten, kan friktionen som gripsockan erbjuder, försvåra rörelseförmågan.

ATT TA PÅ SIG GRIPSOCKAN

- 1 Börja med att sätta den rullade sockans spets över tårna.
- 2 Fortsätt att ta på sockan **genom att rulla upp** den mot hälen.
- 3 **Rulla sockdelen upp mot vristen** samtidigt som man töjer ut sockan över hälen.
- 4 Jämna ut sockan "masserande" med händerna mot foten, kontrollerande samtidigt att sockan inte spänner vid tårna.
OBS! Undvik nätstrukturens utvidgning vid hälen och ovanpå varandra varande spända lager på foten och vristen.

KLIPPNING

- 5 Om användarens fot är uppsvullen, det finns sår / suturer kan sockan utvidgas genom att klippa den. Höj nätet och klipp på det stället som skall utvidgas.
OBS!
Lämna alltid kvar ca 2 cm helt skaft för att få sockan att hållas på foten.
- 6 I duschen lyckas tåtvätten lätt, när man klipper upp ett ca 5 cm hål längs med tårna.
- 7 Vänd sockans spets ner under tårna och efter tvätten tillbaka på plats.

AVLÄGSNING

- 8 Avlägsna sockorna genom att rulla från skaftet ned mot spetsen. Således är sockorna klara för nästa användning.

Teknisk information

CareCare IGS - Instant Grip Sock









Gripsocka som hindrar halkning

Storlek: **XS** (33-36), **S** (36-39), **M** (39-42), **L** (42-45), **XL** (45-47), **XXL** (47-49)

Material: SEBS 

Återvinning: Energiavfall

Lääkinnällinen laite, luokka 1

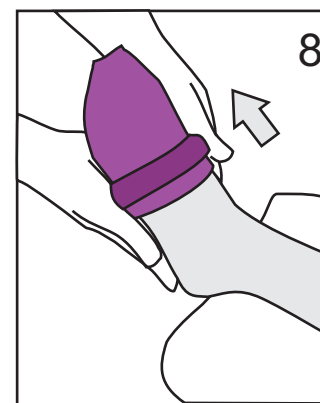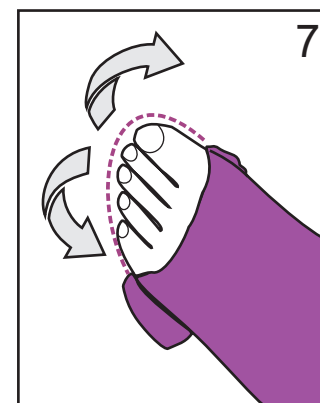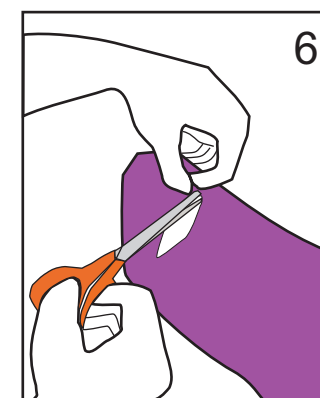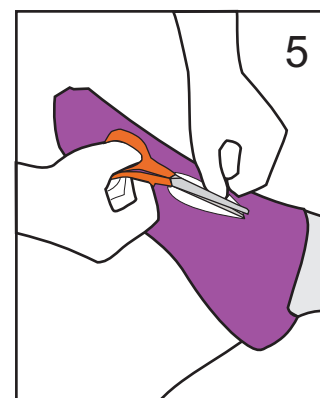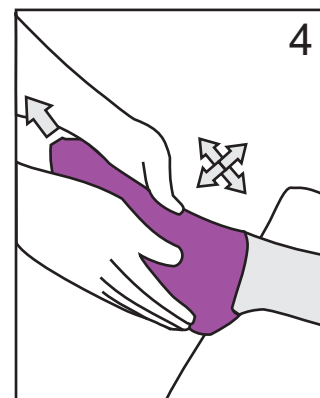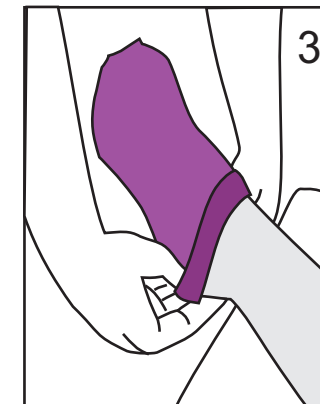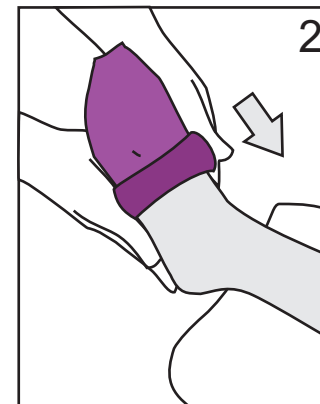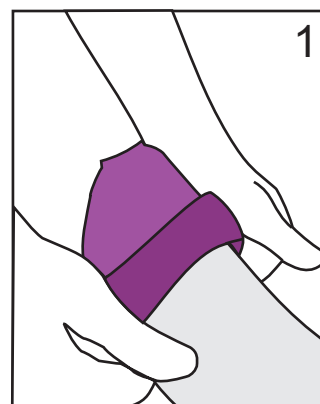

Tillverkare:
CareCare Oy
Patteristontie 21 B
FI - 80400 Ylämylly
www.carecare.fi

Beställningar:
sales@carecare.fi
Tel. beställningar
+358 50 524 7559
Tel. produktutveckling
+358 50 449 7585

  Tillverkad i Finland

Bruksanvisningsvideon: [www.carecare.fi/tuotteet/CareCare IGS](http://www.carecare.fi/tuotteet/CareCare%20IGS)

FI UM11688, Pat.Pend FI 20175379