

# IGS -pitosukan käyttöohjeet

Uusi suomalainen keksintö liukastumisen ehkäisyyn. Helppokäyttöinen, hengittävä ja joustava. Käyttökelpoinen sisällä kaikilla lattiatpinnoilla, myös märkätiloissa. Tuote valmistettu ympäristöystävällisestä energiaksi kierrätettävästä materiaalista. Pitosukka on erittäin kitkainen. Pue pitosukka jalkaan käsillä aukirullaten - ei varresta vetäen.

## Sukan valinta

Valitse käyttäjän jalan koon mukainen sukka. Mikäli jalkaterässä on turvotusta, ompeleita tai haavaumia, valitse yhtä kokoa suurempi sukka. Voit väljentää sukkaa tarvittavalta kohdalta myös leikkaamalla verkkorakenteen aukkoja suuremmaksi, rakenne ei purkaudu. Potilaille, jotka laahaavat jalkaansa, voi pitosukkien tarjoama lisäkitka vaikeuttaa liikkumista.

## Pukeminen

- 1 Aloita asettamalla rullatun sukan kärki varpaiden kohdalle.
- 2 Jatka pukemista aukirullaamalla sukkaa kohti kantapäätä - älä vedä.
- 3 Rullaa sukkaosaa auki kohti nilkkaa samalla varovasti peukaloilla venyttäen kantapään yli.
- 4 Tasoita sukan verkkorakenne käsillä "hieroen" jalkaterän päälle tarkistaen samalla ettei sukka kiristä varpaita.  
**Huom!** Vältä verkkorakenteen venymiä kantapäässä ja tiukkoja kerroksia päkiän ja nilkan kohdalla.

## Leikkaaminen

- 5 Jos käyttäjän jalkaterä on turvoksissa tai siinä on haavaumia/ompeleita, voidaan sukkaa väljentää leikkaamalla. Kohota verkkoa ja leikkaa väljennyskohdasta.
- 6 Suihkussa varpaiden pesu onnistuu, kun leikkaat n. 5 cm poikittaisviillon päkiän alaosan kohdalle.
- 7 Käännä sukan pää jalkaterän alle ja pesun jälkeen takaisin paikoilleen.  
**Huom!** Jätä aina pitosukkien yläosaan n. 2 cm ehjää vartta pitämään sukka jalassa.

## Riisuminen

- 8 Poista sukat rullaamalla varresta kohti kärkeä. Näin sukat ovat valmiina rullalla seuraavaa käyttökertaa varten.

## Tekniset tiedot


### CareCare IGS - Instant Grip Sock

Liukastumista estävä pitosukka

Koko: XS, S, M, L, XL

Materiaali: Antibakteerinen SEBS 

Kierrätys: Energiajäte

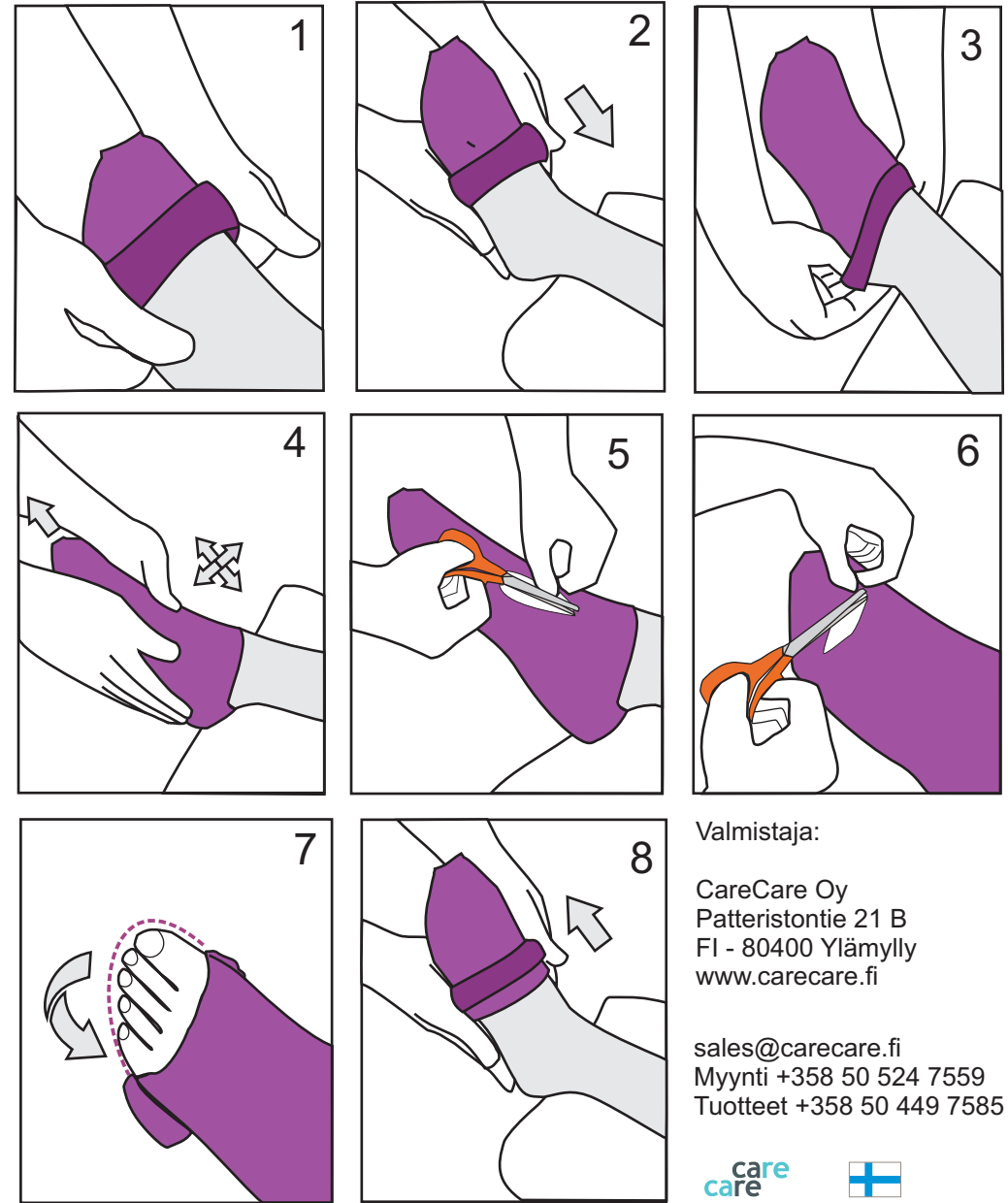

Valmistaja:

CareCare Oy  
Patteristontie 21 B  
FI - 80400 Ylämylly  
www.carecare.fi

sales@carecare.fi  
Myynti +358 50 524 7559  
Tuotteet +358 50 449 7585



Opastevideot: [www.carecare.fi/tuotteet](http://www.carecare.fi/tuotteet)

Pat.Pend FIU 2170664, FI 2170663