

# IGS -pitosukan käyttöohjeet

Uusi suomalainen keksintö liukastumisen ehkäisyyn. Helppokäyttöinen, hengittävä ja joustava. Käyttökelpoinen sisällä kaikilla lattiapinnoilla, myös märkätiloissa. Tuote valmistettu ympäristöystävällisestä energiaksi kierrätettävästä materiaalista. Pitosukka on erittäin kitkainen. **Pue pitosukka jalkaan käsillä auki rullaamalla - ei varresta vetäen.**

## Sukan valinta

Valitse käyttäjän jalan koon mukainen sukka. Mikäli jalkaterässä on turvotusta, ompeleita tai haavaumia, valitse suurempi sukkakoko. Voit väljentää sukkaa tarvittavalta kohdalta leikkaamalla verkkorakenteen aukkoja suuremmaksi; rakenne ei purkaudu. Potilaille, jotka laahaavat jalkaansa, voi pitosukkien tarjoama lisäkitka vaikeuttaa liikkumista.

## Pukeminen

- 1 Aloita asettamalla rullatun sukan kärki varpaiden kohdalle.
- 2 **Jatka pukemista rullaamalla auki sukkaa kohti kantapäätä - älä vedä.**
- 3 **Rullaa sukkaosaa kohti nilkkaa** samalla varovasti peukaloilla venyttäen kantapään yli.
- 4 Tasoita sukan verkkorakenne käsillä "hieroen" tarkistaen samalla ettei sukka kiristä varpaita.  
**Huom!** Vältä verkkorakenteen venymiä kantapäässä ja tiukkoja kerroksia jalkaterän ja nilkan kohdalla.

## Leikkaaminen

- 5 Jos käyttäjän jalkaterä on turvoksissa tai siinä on haavaumia/ompeleita, voidaan sukkaa väljentää leikkaamalla. Kohota verkkoa ja leikkaa väljennyskohdasta.  
**Huom!** Jätä aina pitosukkien yläosaan n. 2 cm ehjää vartta pitämään sukka jalassa.
- 6 Suihkussa varpaiden pesu onnistuu, kun leikkaat pitosukkaan n. 5 cm poikittaisviillon päkiän yläpuolelta lähelle varpaita.
- 7 Käännä sukan pää päkiän alle ja pesun jälkeen takaisin paikoilleen.

## Riisuminen


- 8 Poista sukat rullaamalla varresta kohti kärkeä. Näin sukat ovat valmiina rullalla seuraavaa käyttökertaa varten.


## Tekniset tiedot

### CareCare IGS - Instant Grip Sock

Liukastumista estävä pitosukka









Koko: **XS** (33-36), **S** (36-39), **M** (39-42), **L** (42-45), **XL** (45-47), **XXL** (47-49)

Materiaali: SEBS 

Kierrätys: Energijäte 



Lääkinnällinen laite, luokka 1

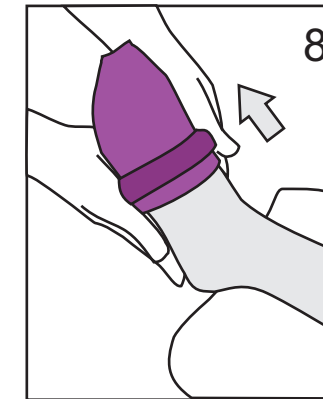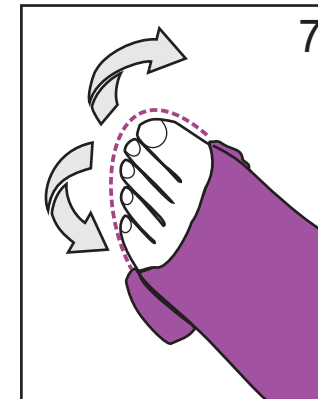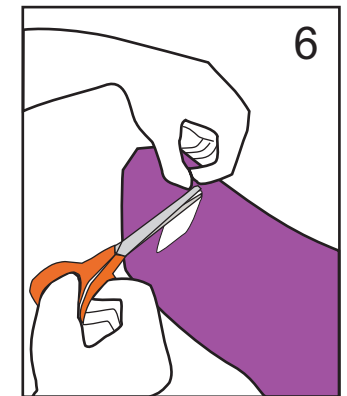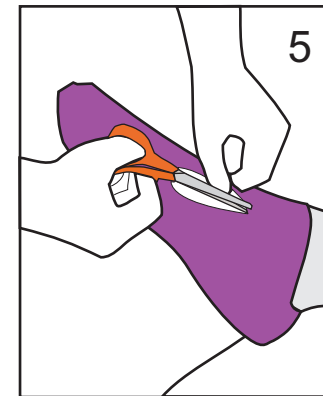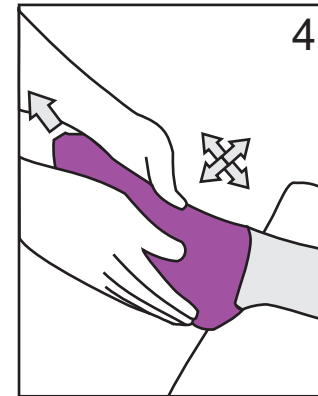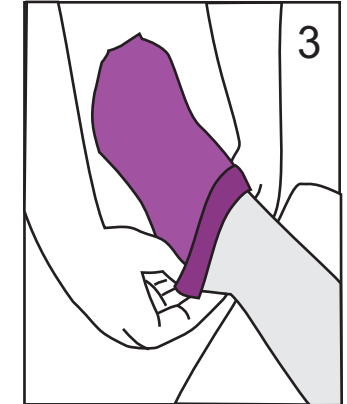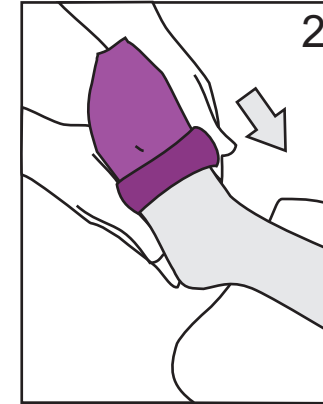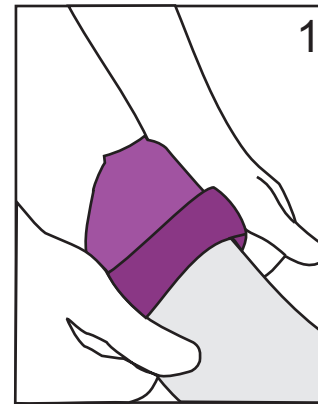

Valmistaja:

CareCare Oy  
Patteristontie 21 B  
FI - 80400 Ylämylly  
www.carecare.fi

sales@carecare.fi  
Myynti +358 50 524 7559  
Tuotteet +358 50 449 7585



Opastevideot: [www.carecare.fi/tuotteet](http://www.carecare.fi/tuotteet)

FI UM11688, Pat.Pend FI 20175379