

Friktionsband –

För positionsterapi

Bruksanvisning

Granskad 9.1.24

Ett hjälpmedel vid positionsterapi för patienter med cerebrovasculära sjukdomar.


Hjälpmedlet bidrar till att öka patientens funktionsförmåga och självständighet.

Positionsterapi och aktiv rehabilitering går hand i hand vid rehabiliteringen av patienter med cerebrovasculära sjukdomar. En remsa med nätstruktur används på handen för att öka friktionen mellan kontaktytorna, t.ex. när du äter eller rör dig med ett hjälpmedel.

Friktionsbandet har en nätstruktur, andas och anpassar sig till handens form. Produkten är ett rör och du kan skära ett hål för tummen vid det ställe som är lämpligt för ändamålet.

Produktens nätstruktur strukturer går inte sönder

Kan tvättas i maskin i 60 grader med mildt tvättmedel, sköljning rekommenderas. Används i rumstemperatur.

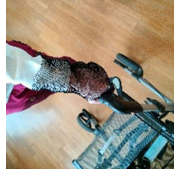

Teknisk information

Ett hjälpmedel vid positionsterapi.

Storlek: Ett flexibelt närrör 45 cm långt.

Material: SEBS. Innehåller inte latex eller silikon. Tillverkad av syntetiskt gummi.

Återvinning: Blandavfall.

Medicinsk utrustning, tillverkningsdatum i streckkod.

Färliga situationer ska anmälas till CareCare Ab och Fimea med hjälp av blanketten;

Användarens anmälan om tillbud.

Basic UDI-DI 643005903GR020WC

Tillverkare:

CareCare Oy FI-MF-000017782

Kirkkokatu 1a A6

FI-80110 Joensuu

www.carecare.se

sales@carecare.fi

Försäljning +358 50 511 2779

FIUM11688



Tillverkad i
Finland



Kitkanauha - Asennon ylläpitoon


Käyttöohje

Tarkastettu 9.1.24

www.carecare.fi

AVH potilaan asennon ylläpitoon tarkoitettu apuväline. Apuväline auttaa lisäämään käyttäjän toimintakykyä ja itsenäistymistä. Asentohoito ja aktiivinen kuntoutus kulkevat rintarinnan AVH potilaan kuntoutuksessa. Verkkomaista tuubinauhaa käytetään kädessä lisäämään kitkaa kosketuksessa olevien pintojen välillä esim. ruokaillessa, liikuttaessa apuvälineellä. Kitkanauha on rakenteeltaan verkkomainen, hengittävä ja käden muotoihin mukautuva nauha. Putkimaiseen tuotteeseen voit leikata reiän peukalolle käyttötarvikkeen mukaiseen kohtaan. Tuotteen verkkomainen rakenne ei purkaudu.

Voidaan pestä 60 asteen konepesussa miedolla pesuaineella, suositellaan huuhtelua. Käytetään huonelämpötilassa.

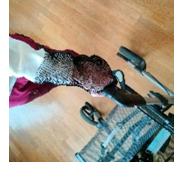

Tekniset tiedot

Apua ja pitoa asennon ylläpitoon.

Koko: Yksi 45 cm pitkä joustava verkkoputki.

Materiaali: SEBS. Ei sisällä lateksia eikä silikonia. Valmistettu synteettisestä kumista.

Kierrätys: Sekajäte.

Lääkinnällinen laite, valmistus pvm. viivakooditarrassa.

Vaaratilanteista pyydetään ilmoittamaan CareCare Oy:lle ja Fimeaan Käyttäjän

Vaaratilanneilmoituslomakkeella.

Basic UDI-DI 643005903GR020WC

Valmistaja:

CareCare Oy FI-MF-000017782

Kirkkokatu 1a A6

FI-80110 Joensuu

www.carecare.fi

sales@carecare.fi

Myynti +358 50 511 2779

Tuotanto +358 50 524 7559



Valmistettu
Suomessa

