

Friktionsband – Hjälp att öppna




Bruksanvisning

Granskad 9.1.24

www.carecare.se

Används för att öka friktionen mellan kontaktytorna när greppkraften försvagas. Du kan vika nätstrukturen två gånger för bättre grepp. Klämkraften som krävs för att öppna burkar eller flaskor kan minskas genom att placera en annan bit friktionstejp under burken eller flaskan som ska öppnas, eller under stöd handen. Fungear även som ett hjälpmedel vid öppning av läkemedelsförpackningar. Det är inte värt att sträcka ut nätstrukturen.

Kan tvättas i maskin i 60 grader med mildt tvättmedel, sköljning rekommenderas. Används i rumstemperatur.

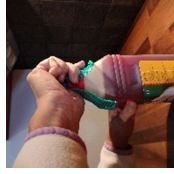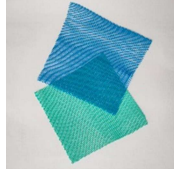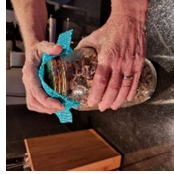

Teknisk information

Öppnarhjälp av burkar eller flaskor.

Storlek: Två delar med måtten 15 x 15 cm.

Material: SEBS. Innehåller inte latex eller silikon. Tillverkad av syntetiskt gummi.

Återvinning: Blandavfall.

Medicinsk utrustning, tillverkningsdatum i streckkod.

Färliga situationer ska anmälas till CareCare Ab och Fimea med hjälp av blanketten;

Användarens anmälan om tillbud.

Basic UDI-DI 643005903GR020WC

Tillverkare:

CareCare Oy FI-MF-000017782

Kirkkokatu1a A6

FI-80110 Joensuu

www.carecare.se

sales@carecare.fi

Försäljning +358 50 511 2779

Produktion +358 50 524 7559



Tillverkad i
Finland






Käyttöohje

Tarkastettu 9.1.24

www.carecare.fi

Käytetään lisäämään kitkaa kosketuksessa olevien pintojen välillä, kun otevoima on heikentynyt. Voit taittaa verkkorakenteen kaksiin kerroin paremman otteen saamiseksi. Purkkien tai pullojen avaamiseen tarvittavaa puristusvoimaa voidaan pienentää asettamalla toinen pala Kitkanauhaa avattavan purkin tai pullon alle tai tukikäden alle. Toimii myös lääkepakkausten avaamisen apuvälineenä. Verkkorakennetta ei kannata venyttää.

Voidaan pestä 60 asteen konepesussa miedolla pesuaineella, suositellaan huuhtelua. Käytetään huonelämpötilassa.

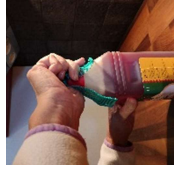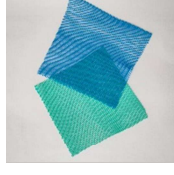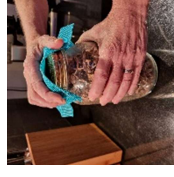

Tekniset tiedot

Apua purkkien ja korkkien avaukseen.

Koko: Kaksi 15 x 15 cm kokoista palaa.

Materiaali: SEBS. Ei sisällä lateksia eikä silikonia. Valmistettu synteettisestä kumista.

Kierrätys: Sekajäte.

Lääkinnällinen laite, valmistus pvm. viivakooditarrassa.

Vaaratilanteista pyydetään ilmoittamaan CareCare Oy:lle ja Fimeaan Käyttäjän

Vaaratilanneilmoituslomakkeella.

Basic UDI-DI 643005903GR020WC

Valmistaja:

CareCare Oy FI-MF-000017782

Kirkkokatu1a A6

FI-80110 Joensuu

www.carecare.fi

sales@carecare.fi

Myynti +358 50 511 2779

Tuotanto +358 50 524 7559



Valmistettu
Suomessa

