


# Friktionsband – Att behålla positionen

## Bruksanvisning

Granskad 12.6.26

Ett hjälpmedel att behålla positionen för patienter med cerebrovasikulära sjukdomar (CVS). Hjälpmedlet bidrar till att öka patientens funktionsförmåga och självständighet. Positionsterapi och aktiv rehabilitering går hand i hand vid rehabiliteringen av patienter med CVS. Ett band med nätstruktur används på handen för att öka friktionen mellan kontaktytorerna, t.ex. när du åter eller rör dig med ett hjälpmedel. Friktionsbandet har en nätstruktur, andas och anpassar sig till handens form. Produkten är ett rör och du kan vid användningen skära ett håll för tummen vid det ställe som är lämpligt. Produktens nätstruktur struktur går inte sönder.

Kan tvättas i maskin i 60°C med milt tvättmedel, sköljning rekommenderas. Används i rumstemperatur.

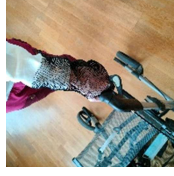

### Teknisk information

Ett hjälpmedel vid positionsterapi.

**Storlek:** 1 st. Storlek S = 45 x 34 cm (L x max. B).

**Krita:** Lila (storlek S), svart (storlek L).

**Material:** SEBS. Innehåller inte latex eller silikon. Tillverkad av syntetiskt gummi.

**Återvinning:** Blandavfall.

Medicinsk utrustning, tillverkningsdatum i streckkod.

Farliga situationer ska anmälas till CareCare Ab och Fimea med hjälp av blanketten;

Användarens anmälan om tillbud.

Basic UDI-DI 643005903GR020WC

### Tillverkare:

CareCare Oy FI-MF-000017782

Kirkkokatu1a A6

FI-80110 Joensuu

www.carecare.se

sales@carecare.fi

**Försäljning** +358 50 511 2779

**Produktion** +358 50 524 7559

FIUM11688




Tillverkad i  
Finland

## Käyttöohje

Tarkastettu 12.6.26

AVH potilaan asennon ylläpitoon tarkoitettu apuväline. Auttaa lisäämään käyttäjän toimintakykyä ja itsenäistymistä. Asentohoito ja aktiivinen kuntoutus kulkevat rintarinnan AVH potilaan kuntoutuksessa. Verkkomaista tuubinauhaa käytetään kädessä lisäämään kitkaa kosketuksessa olevien pintojen välillä esim. ruokaillessa ja liikuttaessa apuvälineillä. Kitkanauha on rakenteeltaan verkkomainen, hengittävä ja käden muotoihin mukautuva nauha. Pukkimaiseen tuotteeseen voit leikata reiän peukalolle käyttötarkoituksen mukaiseen kohtaan. Tuotteen verkkomainen rakenne ei purkaudu.

Voidaan pestä 60°C konepesussa miedolla pesuaineella, suositellaan huuhtelua. Käytetään huonelämpötilassa.

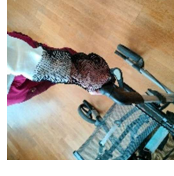

### Tekniset tiedot

Apua ja pitoa asennon ylläpitoon.

**Koko:** 1 kpl. Koko S = 45 x 34 cm (P x maks. L). Koko L = 45 x 41 cm (P x maks. L).

**Värit:** Purppura (koko S), musta (koko L).

**Materiaali:** SEBS. Ei sisällä lateksia eikä siilikonia. Valmistettu synteettisestä kumista.

**Kierrätys:** Sekajäte.

Lääkinnällinen laite, valmistus pvm. viivakooditarrassa.

Vaaratilanteista pyydetään ilmoittamaan CareCare Oy:lle ja Fimeaan Käyttäjän

Vaaratilanneilmoituslomakkeella.

Basic UDI-DI 643005903GR020WC

### Valmistaja:

CareCare Oy FI-MF-000017782

Kirkkokatu1a A6

FI-80110 Joensuu

www.carecare.fi

sales@carecare.fi

**Myynti** +358 50 511 2779

**Tuotanto** +358 50 524 7559



FIUM11688



Valmistettu  
Suomessa