

# Friktionsband – Hjälp att öppna

care  
care




## Bruksanvisning

Granskad 12.6.26

www.carecare.se

Används för att öka friktionen mellan kontaktytor när greppkraften försvagas. Du kan vika nätstrukturen två gånger för bättre grepp. Klämkraften som krävs för att öppna burkar eller flaskor kan minskas genom att placera en annan bit Friktionsband under burken eller flaskan som ska öppnas, eller under stöd handen. Funge rar även som ett hjälpmiddel vid öppning av läkemedelsförpackningar. Det är inte värt att sträcka ut nätstrukturen.

Kan tvättas i maskin i 60°C med mildt tvättmedel, sköljning rekommenderas. Används i rumstemperatur.

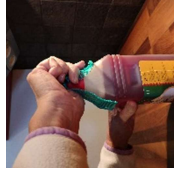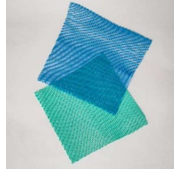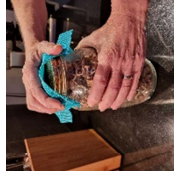

# Kitkanauha - Avaaja-Apu

care  
care




## Käyttöohje

Tarkastettu 12.6.26

www.carecare.fi

Käytetään lisäämään kitkaa kosketuksessa olevien pintojen välillä, kun otevoima on heikentynyt. Voit taittaa verkkorakenteen kaksiin kerroin paremman otteen saamiseksi. Purkkien tai pullojen avaamiseen tarvittavaa puristusvoimaa voidaan pienentää asettamalla toinen pala Kitkanauhaa avattavan purkin tai pullon alle tai tukikäden alle. Toimii myös lääkepakkausten avaamisen apuvälineenä. Verkkorakennetta ei kannata venyttää.

Voidaan pestä 60°C konepesussa miedolla pesuaineella, suositellaan huuhtelua. Käytetään huonelämpötilassa.

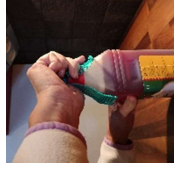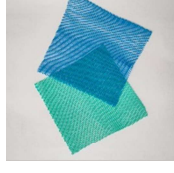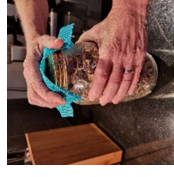

### Teknisk information

Öppnarhjälp av burkar eller flaskor.

**Storlek:** Två delar med måtten 15 x 15 cm.

**Material:** SEBS. Innehåller inte latex eller silikon. Tillverkad av syntetiskt gummi.

**Återvinning:** Blandavfall.

Medicinsk utrustning, tillverkningsdatum i streckkod.

Farlösa situationer ska anmälas till CareCare Ab och Fimea med hjälp av blanketten;

Användarens anmälan om tillbud.

Basic UDI-DI 643005903GR020WC

**Tillverkare:**

CareCare Oy FI-MF-000017782

Kirkkokatu1a A6

FI-80110 Joensuu

www.carecare.se

sales@carecare.fi

**Försäljning** +358 50 511 2779

**Produktion** +358 50 524 7559

### Tekniset tiedot

Apuja purkkien ja korkkien avaukseen.

**Koko:** Kaksi 15 x 15 cm kokoista palaa.

**Materiaali:** SEBS. Ei sisällä lateksia eikä silikonia. Valmistettu synteettisestä kumista.

**Kierrätys:** Sekajäte.

Lääkinnällinen laite, valmistus pvm. viivakooditarraassa.

Vaaratilanteista pyydetään ilmoittamaan CareCare Oy:lle ja Fimeaan Käyttäjän

Vaaratilanneilmoituslomakkeella.

Basic UDI-DI 643005903GR020WC

**Valmistaja:**

CareCare Oy FI-MF-000017782

Kirkkokatu1a A6

FI-80110 Joensuu

www.carecare.fi

sales@carecare.fi

**Myynti** +358 50 511 2779

**Tuotanto** +358 50 524 7559



SEBS



Tillverkad i  
Finland



SEBS



Valmistettu  
Suomessa

