

# Friktionsband - Att köra en manuell rullstol

## Bruksanvisning

Granskad 12.6.26

Ett hjälpmedel för att öka greppstyrkan i händerna vid körning av en manuell rullstol. En remsa med nätstruktur används i handen för att öka friktionen mellan kontaktytorna när greppstyrkan har minskat. Friktionsbandet har en nätstruktur, andas och anpassar sig till handens form. Produkten är ett rör och du kan skära ett hål för tummen vid det ställe som är lämpligt för ändamålet. Produktens nätstruktur går inte sönder. Ej för idrottsbruk.

Kan tvättas i maskin i 60°C med mildt tvättmedel, sköljning rekommenderas. Används i rumstemperatur.



### Teknisk information

**Antal:** 2 st (en i varje hand).

**Storlek:** 2 st. Storlek S = 25 x 34 cm (L x max. B). Storlek L = 25 x 41 cm (L x max. B).

**Krita:** Lila (storlek S), svart (storlek L).

**Material:** SEBS. Innehåller inte latex eller silikon. Tillverkad av syntetiskt gummi.

**Återvinning:** Blandavfall.

Medicinsk utrustning, tillverkningsdatum i streckkod.

Farliga situationer ska anmälas till CareCare Ab och Fimea med hjälp av blanketten;

Användarens anmälan om tillbud.

Basic UDI-DI 643005903GR020WC

### Tillverkare:

CareCare Oy FI-MF-000017782

Kirkkokatu1a A6

FI-80110 Joensuu

www.carecare.se

sales@carecare.fi

**Försäljning** +358 50 511 2779

**Produktion** +358 50 524 7559



SEBS



Tillverkad i  
Finland



# Kitkanauha - Pyörätuolikelaukseen

## Käyttöohje

Tarkastettu 12.6.26

Pyörätuolikelauksen apuväline käteen lisäämään otevoimaa. Verkkomaista tuubinauhaa käytetään kädessä lisäämään kitkaa kosketuksessa olevien pintojen välillä, kun otevoima on heikentynyt. Kitkanauha on rakenteeltaan verkkomainen, hengittävä ja käden muotoihin mukautuva nauha. Putkimaiseen tuotteeseen voit leikata reiän peukalolle käyttötarvikkeen mukaiseen kohtaan. Tuotteen verkkomainen rakenne ei purkaudu. Ei urheilukäyttöön.

Voidaan pestä 60°C konepesussa miedolla pesuaineella, suositellaan huuhtelua. Käytetään huonelämpötilassa.



### Tekniset tiedot

**Määrä:** 2 kpl (yksi kumpaankin käteen).

**Koko:** 2 kpl. Koko S = 25 x 34 cm (P x maks. L). Koko L = 25 x 41 cm (P x maks. L).

**Värit:** Lila (koko S) ja musta (koko L).

**Materiaali:** SEBS. Ei sisällä lateksia eikä silikonia. Valmistettu synteettisestä kumista.

**Kierrätys:** Sekajäte.

Lääkinnällinen laite, valmistus pvm. viivakooditarrassa.

Vaaratilanteista pyydetään ilmoittamaan CareCare Oy:lle ja Fimeaan Käyttäjän

vaaratilanneilmoituslomakkeella.

Basic UDI-DI 643005903GR020WC

### Valmistaja:

CareCare Oy FI-MF-000017782

Kirkkokatu1a A6

FI-80110 Joensuu

www.carecare.fi

sales@carecare.fi

**Myynti** +358 50 511 2779

**Tuotanto** +358 50 524 7559



SEBS



Valmistettu  
Suomessa

